




Bierstraße 111
D-31246 Lahstedt

Tel. +49 (0)51 74 / 92 03 73
Fax +49 (0)51 74 / 92 03 74
e-mail lifamed@t-online.de
www.lifamed.de




Materialvorbereitung

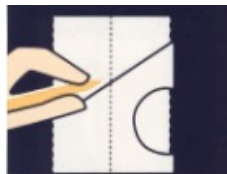


1. Vorbereitung der OCL-Schiene. Bitte verwenden Sie die Schablone




2. Eintauchen in kaltes Wasser.

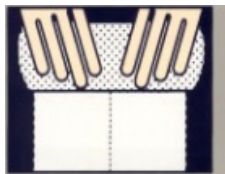


2. Wasser auspressen. (Schaumseite außen)

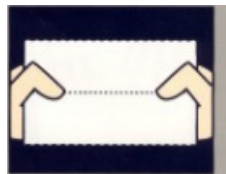

4. Auf Unterlage auflegen und auseinanderziehen.

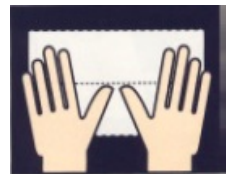

5. Glattstreichen und laminieren, erforderliche Schnitte anbringen

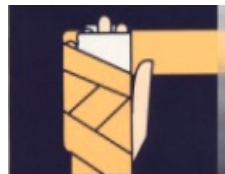


6. OCL-Schiene mit der Schaumseite auf die Haut applizieren und bandagieren.

Anwendungsbeispiele



1. Messen Sie die Länge bis in die gewünschte Höhe unterhalb des Knies und schneiden Sie das Material ab.

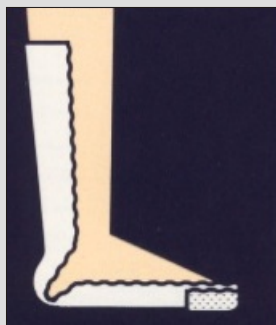

2. Nach der allgemeinen Vorbereitung applizieren Sie die OCL-Schiene mit der Schaumseite auf die Haut und bilden durch Umschlagen ein Zehenplateau.



3. Formen Sie Falten und legen Sie diese um den Fersenbereich, wie abgebildet. Klappen Sie die Schiene unterhalb des Knies ein.




4. Bandagieren Sie entgültig mit elastischer Binde



1. Nach allgemeiner Vorbereitung schneiden Sie die Öffnung für den Daumen aus (nass). Falls gewünscht, einen dorsalen oder volaren Flügel



2. Bringen Sie den Daumen durch den ovalen Ausschnitt und formen die Schiene an.

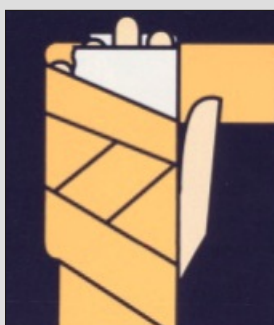

3. Entgültige Bandage mit elastischer Binde. Fingerzwischenräume wie üblich abpolstern.



Volare oder dorsale Ausschnitte
Ausschnitte sind praktisch jeder Form möglich.

SR 411 Gips-Schiene 11-lagig 10,0 cm breit VE 2 Stück
SR 511 Gips-Schiene 11-lagig 12,5 cm breit VE 2 Stück
SR 611 Gips-Schiene 11-lagig 15,0 cm breit VE 2 Stück